



PARAFİN CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
FTR_T_03	02.01.2023	-	-	2

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Fizik Tedavi Anabilim Dalı Başkanı	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



PARAFİN CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
FTR_T_03	02.01.2023	-	-	2

1. AMAÇ

Parafin cihazının verimli ve doğru kullanımını sağlamak.

2. KAPSAM

Parafin cihazının kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR:-

5. SORUMLULAR

Bu talimatların uygulanmasından başhekim, başhekim yardımcısı, doktor ve fizyoterapist sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. UYGULAMA

- 6.1.1. Cihaz devamlı çalışır durumdadır. İçinde parafin+vazelin karışımı bulunur.
- 6.1.2. Isısı 52-57° C'de tutulur.
- 6.1.3. Hasta elini parafine daldırır ve hemen çıkartır.
- 6.1.4. Elini oynatmaması gerekir.
- 6.1.5. 10 defa bu daldırma işlemi sürer.
- 6.1.6. Ardından eller havluya ve sonra poşete sarılır. 15-20 dakika beklenir.
- 6.1.7. Havlu ve poşet açılır.
- 6.1.8. Hasta parafini soyarak kazana tekrar geri koyar.
- 6.1.9. Cihazda oluşan arızalar sorumlu biyomedikale bildirilir.
- 6.1.10. Her hafta süzme yöntemiyle temizliği yapılarak, 6 ayda bir tüm parafin maddesi değiştirilir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:-