



LAZER CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
FTR_T_05	02.01.2023	-	-	2

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Fizik Tedavi Anabilim Dalı Başkanı	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



LAZER CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
FTR_T_05	02.01.2023	-	-	2

1. AMAÇ

Cihazın uygun çalışmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Cihazın kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR:-

5. SORUMLULAR

Bu talimatların uygulanmasından başhekim, başhekim yardımcısı, doktor ve fizyoterapist sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1.Hasta Cildinin Lazer Terapisi İçin Hazırlanması

Lazer terapisini hastaya uygulamadan önce, hastanın cildini işleme hazırlamanız gerekir.

Hastanın cildini Lazer terapisi için uygun bir şekilde hazırlayarak, daha fazla Lazer enerjisinin hedeflenen alanlara ulaşmasını ve cilt tahrişi riskinin azalmasını sağlarsınız.

Hastanın cildini Lazer terapisine hazırlamak için şunları gerçekleştirin:

6.1.1. Lazer başlığını yerleştireceğiniz cilt bölgesini hafif sabun ve suyla veya alkolü bezle temizleyin.

6.1.2. Cildin tamamen kurumasını bekleyin.

6.1.3. Ana Sayfa ekranında Lazer simgesini seçeneğini seçin.

6.1.4. Terapi süresini ayarlamak için, Yoğunluk düğmesini kullanın: • Saat yönüne – Süreyi artırır • Saat yönünün tersine – Süreyi azaltır

6.1.5. Hasta ve fizyoterapist lazer gözlüklerini takar.

6.1.6. Uygulama yapılacak bölgeye lazer probu yerleştirilir.

6.1.7. Terapiye başlamak için Start (Başlat) butonuna, tedaviyi duraklatmak için Pause (Duraklat) butonuna veya tedaviyi sonlandırmak için Stop (Durdur) butonuna basın.

6.2. Emniyet Talimatı

➤ Yan Etkileri Önleme Lazer terapisinin yan etkilerini önlemek üzere şu işlemleri uygulayın:

• Tedavi sırasında ve sonrasında, tedavi edilen alanı kontrol edin ve herhangi bir olumsuz etki görülmesi halinde tedaviyi sonlandırın.

• Yüksek çıkış seviyeleri, büyük olasılıkla hastanın rahatsızlık duymasına neden olur. Çıkış seviyesini azaltmak için daha düşük bir doz seçin ya da hastanın rahatsızlığını azaltmak için aralıklı bir görev döngüsü belirleyin.

➤ Tedaviyi Etkileyen Faktörler Aşağıdaki faktörler Lazer tedavisini etkileyebilir:

- Ten rengi (koyu veya açık)
- Lezyonun yaşı
- Lezyonun derinliği
- Hastanın hassasiyeti
- Doku türü
- Işığa karşı hassasiyeti arttıran ilaçlar

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:-