



ESWT CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
FTR_T_08	02.01.2023	-	-	2

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Fizik Tedavi Anabilim Dalı Başkanı	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



ESWT CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
FTR_T_08	02.01.2023	-	-	2

1. AMAÇ

Cihazın uygun çalışmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Cihazın kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR:-

5. SORUMLULAR

Bu talimatların uygulanmasından başhekim, başhekim yardımcısı, doktor ve fizyoterapist sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1.Uygulama

- 6.1.1. Cihazı fişe tak
- 6.1.2. Cihazı arkasındaki siyah düğmeden aç
- 6.1.3. Cihazın açılan ekranında uygulanacak bölgeyi seç
- 6.1.4. Tanısına göre protokolü seç
- 6.1.5. Ayarlı olan tanı protokolünü başlat
- 6.1.6. ESWT probunu uygulanacak bölgeye yerleştir
- 6.1.7. ESWT probundaki düğmeye basıp tedaviyi başlat
- 6.1.8. Probu gezdirerek ayarlı protokol boyunca tedaviyi devam ettir.
- 6.1.9. Süre bitince otomatik olarak tedavinin sonlanması.
- 6.1.10. Tedavi bitiminde ana ekrana dönülür.
- 6.1.11. Cihaz kapatılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:-