



HEMODİYALİZ CİHAZI HAZIRLANMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_96	28.8.2023	-	-	2

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Başhemşirelik	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



HEMODİYALİZ CİHAZI HAZIRLANMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_96	28.8.2023	-	-	2

1. AMAÇ

Hemodiyaliz ünitesi hemodiyaliz cihazlarını yıkama ve kullanıma hazırlanması.

2. KAPSAM

Diyaliz ünitesi faaliyetlerini sürdürmek.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR:-

5. SORUMLULAR

- Diyaliz Sorumlu Hemşiresi
- Diyaliz Hemşireleri
- Diyaliz Teknisyeni, Teknikeri.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Uygulama

- 6.1.1.** Hemodiyaliz cihazı açılır.
- 6.1.2.** Asidik solüsyona kırmızı pipet, bazik solüsyona mavi pipet yerleştirilir.
- 6.1.3.** Makine test moduna alınarak testin tamamlanması beklenilir.
- 6.1.4.** Pipetler aracılığı ile konsantre solüsyonlar ve sistemden makineye gelen saf su cihazı tarafından otomatik olarak karıştırılarak nihai diyaliz solüsyonu elde edilir.
- 6.1.5.** Hemodiyaliz cihazına ekstrakorporeal kan devresi yani arter ven seti ve diyalizör takılır. Ekstrakorporeal kan devresi içinden %0,9 NaCl geçirilerek hem etilen oksit uzaklaştırılır hemde diyalizör ve ona bağlanan arter ven setlerinin içinde hava kalmaksızın serum fizyolojik dolması sağlanır.
- 6.1.6.** Setleme ve girişimlerin bitiminde, bağlantı esnasında kontaminasyona dikkat edilir.
- 6.1.7.** Bu işlemler sonrası makine hazır hale gelir.
- 6.1.8.** Kullanımdan sonra hastanın cihaz ile bağlantısının kesilmesini bekleyiniz.
- 6.1.9.** Hasta cihazdan çıktıktan sonra setleri cihazdan dikkatlice ayırınız.
- 6.1.10.** Adaptörleri diyalizörden çıkarıp yerlerine takınız.
- 6.1.11.** Adaptörler yerine takıldıktan sonra "by-pass" kapağını kapatınız.
- 6.1.12.** Cihaz yıkamaya hazır hale gelmiştir.
- 6.1.13.** Eğer cihaz ikinci seans için kullanılmayacaksa, "DISINFECTION" butonuna basıp 6 no'lu yıkama yapılır.
- 6.1.14.** 6 no'lu yıkama yaklaşık 30 dakika sürecektir ve bu yıkama sıcak su ile yapılır.
- 6.1.15.** Yıkama işlemi bittikten sonra cihazı Sodyum Hipoklorid (1/10'luk) ile itinayla silip kurulayınız. Cihaz bir sonraki seansa hazırdır.
- 6.1.16.** Bütün bu işlemler sırasında mutlaka eldiven kullanınız.
- 6.1.17.** Cihazın aylık bakımlarının teknik servis tarafından yapılmasını sağlayınız.
- 6.1.18.** Seans bitimi bidon içinde az kalmış olan solüsyonları kesinlikle birbirinin içine boşaltmayınız.
- 6.1.19.** Seans bitimi, cihazın içinde solüsyonların donup tıkanıklıklara yol açmaması için en kısa sürede yıkamaya alınız.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:-