



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	RevizyonNo:	ToplamSayfaSayısı:
STE_T_12	30.01.2023		--	2

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Onaylayan/İdari	Onaylayan /Kalite
Başhemşirelik	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı

**MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI KULLANIM TALİMATI**

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
STE_T_12	30.01.2023	--	--	2

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, Belimed SONİCA Ultrasonic yıkama cihazının doğru çalıştırılması ve kullanımını için standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat Belimed SONİCA Ultrasonic yıkama cihazının kullanım faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Merkezi sterilizasyon ünitesi personeli sorumludur.

4. TANIMLAR

Belimed SONİCA Ultrasonic yıkama cihazı; lümenli alet ve mikro cerrahi aletlerinin üzerindeki organik maddelerin belli bir sıcaklıkta (45-50 C' de), ultrasonik dalgalar ile mekanik temizliğinin yapılmasını sağlayan bir cihazdır.

5. UYGULAMALAR

- 5.1. Sıvı tankı işaretli yere kadar doldurulur
- 5.2. Sıvı içine koyulacak enzimatik solüsyon miktarı üretici firma önerileri doğrultusunda eklenir.
- 5.3. Cihazın güç düğmesi açılır.
- 5.4. Kalibrasyon düğmesine basılarak 5 dk kalibrasyonu sağlanır.
- 5.5. Yıkama zamanı düğmesine basılarak istenen süre ayarlanır (5-10 dk)
- 5.6. Dijital göstergeden ısı 45 C'ye ayarlanır.
- 5.7. Delikli yıkama sepetine malzemeler fazla yükleme yapılmadan yerleştirilir.
- 5.8. Geniş yüzeyli büyük cihazlar ultrasonik dalgaları engelleyeceğinden sepetin alt kısmına yerleştirilir.
- 5.9. Cihaz yüzeyine cerrahi aletler kesinlikle değmemelidir.
- 5.10. Kapaklı malzemelerin kapakları açılarak cihaza yerleştirilir.
- 5.11. İşlem yapılacak malzemenin tamamı sıvı içinde olmalıdır.
- 5.12. Kapak kapatılarak başlat düğmesine basılır.
- 5.13. Yıkama süresi bitiminde malzemeler akan suyun altında bolca durulanır.
- 5.14. Lümen içleri kontrol edilir, kirlilik var ise ile temizlenir ve basınçlı su ve hava geçirilerek yumuşak bir bez ile kurulanır.
- 5.15. Ultrasonic yıkama cihazının sıvısı kirlendikçe ve de üretici firmanın önerdiği sürelerde değiştirilir.
- 5.16. İçindeki sıvıyı boşaltmak için su tahliye vanası açılır.
- 5.17. Her solüsyon değişim sonrası boşaltılan tankın içi dezenfektan solüsyon ile ıslatılmış bez ile silinir.
- 5.18. Çalışırken cihazın içine asla el sokulmamalıdır.
- 5.19. Çalışmadığı zamanlarda cihaz elektrik fişinden çıkarılmalıdır.
- 5.20. Ultrasonic cihazı etkinliğini değerlendirmek için haftalık etkinlik değerlendirme testi yapıp "MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ ULTRASONİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU" formuna kayıt edilir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

- 6.1. MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ ULTRASONİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU