



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

**OTOMATİK ALET YIKAMA MAKİNESİ (Dezenfekte Makinesi / Belimed WD 230-250-290)
KULLANIM TALİMATI**

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_013	04.09.2012	-	-	2

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Teknik Hizmetler Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



**OTOMATİK ALET YIKAMA MAKİNESİ (Dezenfekte Makinesi / Belimed WD 230-250-290)
KULLANIM TALİMATI**

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_013	04.09.2012	-	-	2

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, Belimed WD 230-250-290 Yıkama ve Dezenfeksiyon Kurutma Cihazı'nın kullanımı için standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat Belimed WD 230-250-290 Yıkama ve Dezenfeksiyon Kurutma Cihazı'nın kullanım faaliyetini kapsar.

3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Merkezi Sterilizasyon Ünitesi personeli sorumludur.

4. TANIMLAR

5. UYGULAMA

5.1. Cihazı Çalıştırmadan Önce Yapılması Gerekenler

- 5.1.1.** Cihazın etrafından su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir. Su kaçağının tespit edilmesi halinde Teknik Servise “**Teknik Servis Arıza Bildirim Formu**” aracılığı ile haber verilmelidir.
- 5.1.2.** Cihazın yanında bulundurulmuş deterjan, notrolizer bidonlarının seviye kontrolü yapılmalıdır.
- 5.1.3.** Cihaza elektrik geldiği kontrol edilmelidir. Kırmızı renkli, ana açma şalteri ok yönünde yukarıyı gösterecek şekilde çevrilir. Açma kapama tuşuna (OI) basarak elektrik kontrolü yapılmalıdır.
- 5.1.4.** Su sisteminin çalışır ve sistemde basınçlı şebeke suyunun olduğundan emin olunmalıdır.

5.2. Cihazın Kullanımı Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 5.2.1.** Cihazın (OI) on / off anahtarı açılır ve ekranda program bilgileri görülür.
- 5.2.2.** Cihazın ekranındaki bilgileri değerlendirerek gerekli işlemler yapılmalıdır.
- 5.2.3.** CS door open (temiz taraf kapısı) kapalı ve kilitli olmalıdır.
- 5.2.4.** DS door open (kirli taraf kapısı) kapalı ve kilitli olmalıdır.
- 5.2.5.** Program ready (program hazır) ikazını görünür konumda olmalıdır.
- 5.2.6.** İstenilen programdan biri seçilir (P1-P6).
- 5.2.7.** Program bittiğinde temiz tarafta yeşil lamba yanacak ve kirli taraftaki program lambaları sıra ile yanarak ve makine sesli olarak ikaz verecektir.
- 5.2.8.** Açma düğmesine basarak kapı kilitten kurtarılır ve açma kapama kullanılarak kol açılır.
- 5.2.9.** Eğer yıkama esnasında bir arıza olursa makine ERROR kodunu ekranda göstererek ve duracaktır. Bu durumda cihazın yetkili servisinin teslim etmiş olduğu “Hata Kod Listesi”nden arızayı bulur ve teknik servise “**Teknik Servis Arıza Bildirim Formu**” aracılığı ile bilgi verilir. Bu süreçte makine içinde bulunan malzemelerin dezenfeksiyon işlemi tamamlanmadığından kullanılmamalıdır.

5.3. Cihazı Kapatırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 5.3.1.** Cihazın içinin boş olduğu kontrol edilir.
- 5.3.2.** Rafların cihazın içinde olduğu ve temiz kapısının her zaman kapalı olduğundan emin olunmalıdır.
- 5.3.3.** Cihazın (OI) anahtarı kullanılarak cihaz kapatılmalıdır.
- 5.3.4.** Kırmızı renkli ana açma kapama şalterinin sürekli (1) konumunda olduğuna mutlaka dikkat edilmelidir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Teknik Servis Arıza Bildirim Formu